

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/klucz-magnetyczny-plastikowy-p-235.html>

Klucz magnetyczny do pasów unieruchamiających SalvaFix

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	50,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UG-TGO-PU-KM-P

Opis produktu

Klucz magnetyczny SalvaFix SVF3551 do zamków pasów unieruchamiających

Lekki, plastikowy klucz magnetyczny przeznaczony do zamków systemu pasów ograniczających ruchy **SalvaFix**. Klucz magnetyczny **SVF3551** służy do otwierania zamków magnetycznych **SVF3500 / SVF3505 / SVF3510**. Umożliwia szybkie i kontrolowane otwieranie pasów unieruchamiających stosowanych na nadgarstki, kostki, uda i tułów pacjenta. Dzięki wbudowanemu **pierścieniowi centrującemu** klucz sam ustawia się we właściwej pozycji na zamku, co skraca czas reakcji personelu.

Mocny **magnes neodymowy** (około 6× mocniejszy od standardowego magnesu ferrytowego) zapewnia pewne działanie klucza przez długi czas. To praktyczne akcesorium uzupełnia kompletny [magnetyczny komplet pasów unieruchamiających SalvaFix](#) oraz dedykowany [zamek magnetyczny do pasów SalvaFix](#).

Najważniejsze zalety klucza magnetycznego SalvaFix

- **Dedykowany** do systemu pasów ograniczających ruchy **SalvaFix** z zamkami magnetycznymi.
- **Szybkie otwieranie** zamków dzięki pierścieniowi centrującemu – mniej prób ustawiania klucza.
- **Magnes neodymowy** – wysoka siła przyciągania i trwałość działania.
- **Lekka, plastikowa konstrukcja** – wygodne noszenie na smyczy lub breloku.
- **Otwór do zawieszenia** – łatwe przechowywanie, mniejsze ryzyko zgubienia klucza.
- Stworzony do intensywnej pracy w oddziałach szpitalnych, ZOL, DPS i innych placówkach opiekuńczych.

Zastosowanie i kompatybilność

Klucz współpracuje z zamkami magnetycznymi stosowanymi w pasach systemu **SalvaFix**, m.in. z:

- **SVF3500** – zamek magnetyczny SalvaFix
- **SVF3505** – zamek magnetyczny SalvaFix
- **SVF3510** – zamek magnetyczny SalvaFix

Jeśli kompletujesz cały system, zobacz również dedykowany [zamek magnetyczny do pasów SalvaFix](#).

- [magnetycznymi pasami unieruchamiającymi na nadgarstki](#)
- [magnetycznymi pasami unieruchamiającymi na kostki](#)
- [magnetycznym pasem unieruchamiającym na tułów](#)
- [magnetycznym pasem unieruchamiającym na uda](#)
- [uprząż na klatkę piersiową zamykaną na zamki magnetyczne](#)


Dzięki temu jeden typ klucza może obsłużyć cały zestaw [pasów ograniczających ruchy](#) w danej placówce, co ułatwia organizację pracy i szkolenie personelu.

Uwaga: prezentowany produkt to **sam klucz magnetyczny**. Zamki oraz pasy unieruchamiające widoczne na zdjęciach są elementami oddzielnie dostępnymi w naszej ofercie.



Jak używać klucza magnetycznego SalvaFix?

1. Przyłóż klucz płaską podstawą do zamka magnetycznego w pasie unieruchamiającym.
2. Pierścień centrujący pomoże ustawić klucz we właściwej pozycji nad mechanizmem zamka.
3. Po odblokowaniu zamka zdejmij klucz i odłóż go w bezpieczne, stałe miejsce (np. na smyczy przy kurtce, fartuchu lub stacji pielęgniarstwa).

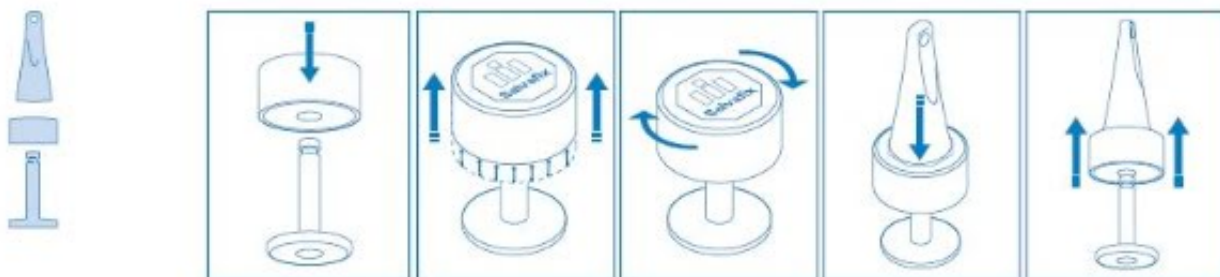

Dane techniczne

- Wysokość klucza: **ok. 50 mm**
- Zewnętrzna średnica podstawy: **ok. 33 mm**
- Średnica powierzchni przykładanej do zamka (wewnętrzna podstawa): **ok. 30 mm**
- Średnica magnesu neodymowego: **ok. 13 mm**

-
- Kolor: **niebieski / granatowy**
 - Materiał korpusu: **tworzywo sztuczne (plastik)**
 - Dodatki: **pierścień centrujący, otwór do zawieszenia na smyczy lub breloku**

Eksploatacja i utrzymanie klucza w dobrej kondycji

- Przechowuj klucz w stałym, łatwo dostępnym miejscu – najlepiej na smyczy lub dedykowanym breloku.
- Regularnie kontroluj stan obudowy i pierścienia centrującego; w razie widocznych uszkodzeń rozważ wymianę klucza.
- Czyść klucz zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce, unikając środków mogących uszkodzić tworzywo sztuczne.