

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/magnetyczny-pas-unieruchamiajacy-na-tulow-p-192.html>



Magnetyczny pas unieruchamiający na tułów SalvaFIX Memory Pro M/L/XL

Cena brutto	1 039,00 zł
Cena netto	962,04 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	U-TGO-SVF3000/3002/3003

Opis produktu

Pas magnetyczny na tułów SalvaFIX Memory Pro z kluczem

Magnetyczny pas unieruchamiający na tułów SalvaFIX Memory Pro to profesjonalny element systemu ograniczającego ruchy pacjenta w łóżku. Produkt służy do kontrolowanego zabezpieczenia tułowia i ograniczenia niekontrolowanych ruchów w warunkach placówki medycznej, opiekuńczej, geriatrycznej lub psychiatrycznej. Pas powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki oraz obowiązującymi przepisami.

Ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest **pas magnetyczny na tułów**, pas do unieruchomienia pacjenta w łóżku, pas brzuszny z kontrolą dostępu albo element systemu pasów ograniczających ruchy. Zapięcie magnetyczne ogranicza ryzyko przypadkowego lub nieuprawnionego rozpięcia, ponieważ do otwarcia zamka potrzebny jest dedykowany klucz magnetyczny.

Co znajduje się w zestawie?

Zgodnie z danymi producenta dla serii SalvaFIX Memory Pro, liczba zamków zależy od rozmiaru pasa. Rozmiar M zawiera 3 zamki magnetyczne, natomiast rozmiary L i XL wymagają 4 zamków magnetycznych.

- **1 pas unieruchamiający na tułów SalvaFIX Memory Pro** z ujęciem krocza,
- **3 zamki magnetyczne** w rozmiarze M,
- **4 zamki magnetyczne** w rozmiarach L i XL,
- **1 klucz magnetyczny SalvaFIX** do otwierania zamków,
- **instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania.**

Rozmiary pasa na tułów SalvaFIX

Rozmiar	Obwód tułowia	Kod producenta	Zamki i klucz w zestawie
M	68-108 cm	SVF 3000 / SVF 3000P	3 zamki magnetyczne + 1 klucz
L	95-135 cm	SVF 3002 / SVF 3002P	4 zamki magnetyczne + 1 klucz
XL	115-150 cm	SVF 3003 / SVF 3003P	4 zamki magnetyczne + 1 klucz

Rozmiar S dostępny na zapytanie, sprzedawany pod zamówienie indywidualne.

Najważniejsze cechy produktu

- **System magnetyczny** – pas zamykany jest przy użyciu zamków magnetycznych SalvaFIX.
- **Kontrola dostępu** – otwarcie wymaga użycia klucza magnetycznego.
- **Pas z ujęciem krocza** – pomaga ograniczyć zsuwanie się pacjenta w pasie.
- **Materiał: poliester** – przystosowany do intensywnego użytkowania w placówkach.
- **Miękkie wykończenie od strony ciała** – poprawia komfort i ogranicza ryzyko otarć.
- **Metalowe oczka i wzmocnienia** – wspierają trwałość systemu mocowania.
- **Latex free** – produkt nie zawiera lateksu.
- **Możliwość prania do 90°C** – zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowanie pasa magnetycznego na tułów

Pas SalvaFIX Memory Pro stosuje się do zabezpieczenia tułowia pacjenta w łóżku, gdy konieczne jest czasowe ograniczenie niekontrolowanych ruchów. Może być elementem systemu pasów ograniczających ruchy w placówkach medycznych, opiekuńczych, psychiatrycznych, geriatrycznych oraz w innych miejscach, w których procedury dopuszczają użycie profesjonalnych pasów do unieruchomienia pacjenta.

W przypadku potrzeby rozbudowy systemu sprawdź także: [pasy ograniczające ruchy](#), [pasy magnetyczne na nadgarstki](#), [pasy magnetyczne na kostki](#), [pas magnetyczny na uda](#), [uprząż na klatkę piersiową](#) oraz [kompletny zestaw pasów unieruchamiających SalvaFIX](#).

Dane techniczne i identyfikacja

- **Seria:** SalvaFIX Memory Pro
- **Producent:** Medicare System / SalvaFIX
- **Typ produktu:** magnetyczny pas unieruchamiający na tułów
- **Rozmiary w karcie:** M 68-108 cm, L 95-135 cm, XL 115-150 cm
- **Kody producenta:** SVF 3000 / SVF 3002 / SVF 3003
- **Numer katalogowy w sklepie:** U-TGO-SVF3000/3002/3003
- **Zawartość:** pas na tułów z ujęciem krocza, 3 zamki dla M lub 4 zamki dla L/XL, 1 klucz magnetyczny, instrukcja

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Użycie pasa musi być zgodne z procedurami placówki, obowiązującymi przepisami i decyzją osoby uprawnionej.
- Podczas stosowania wymagany jest stały nadzór nad pacjentem oraz regularna kontrola skóry, komfortu i krążenia.
- Do systemu należy stosować oryginalne elementy SalvaFIX, w tym odpowiednie zamki i klucze magnetyczne.
- Klucz magnetyczny należy przechowywać poza dostępem osób nieuprawnionych.
- U pacjentów z rozrusznikiem serca należy zachować bezpieczną odległość klucza magnetycznego od urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Pas można prać do **90°C**, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed praniem należy usunąć elementy zamykające, jeżeli są zamontowane.
- Zamków i elementów magnetycznych nie należy prać razem z pasem.
- Producent wskazuje: nie wybielać i nie prasować.
- Rzępy warto okresowo czyścić z włókien i zabrudzeń, aby zachować skuteczność mocowania.

Elementy zapasowe do systemu SalvaFIX

W przypadku potrzeby dokupienia elementów zapasowych sprawdź również: [klucz magnetyczny SalvaFIX](#) oraz [zamek magnetyczny do pasów SalvaFIX](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar pasa na tułów: Rozmiar M - 68 - 108 cm , Rozmiar L - 95 - 135 cm , Rozmiar XL - 115 - 150 cm