

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-stabilizujacy-miednice-i-tulow-p-226.html>

Pas stabilizujący miednicę i tułów do wózka inwalidzkiego i fotela rehabilitacyjnego

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	128,70 zł
Numer katalogowy	UG-TGO-PS-SCP4100

Opis produktu

Pas stabilizujący miednicę i tułów do wózka inwalidzkiego i fotela rehabilitacyjnego

Pas stabilizujący miednicę i tułów to wygodny pas bezpieczeństwa przeznaczony do zabezpieczenia pacjenta w pozycji siedzącej na **wózku inwalidzkim**, krześle rehabilitacyjnym lub fotelu. Pomaga utrzymać prawidłową pozycję ciała, zapobiega zsuwaniu się z siedziska oraz zwiększa komfort i poczucie bezpieczeństwa u osób z obniżoną kontrolą tułowia.

Prezentowany model w rozmiarze **L** ma szeroki zakres regulacji obwodu od **72 do 190 cm**, dzięki czemu pas można dopasować do zdecydowanej większości użytkowników – zarówno szczupłych, jak i o większym obwodzie tułowia i miednicy.

Zastosowanie pasa stabilizującego miednicę i tułów

Pas stabilizujący tułów i miednicę sprawdzi się szczególnie u:

- osób starszych i niepełnosprawnych mających trudności z utrzymaniem równowagi w pozycji siedzącej,
- pacjentów z chorobami neurologicznymi, po udarach i urazach,
- osób po zabiegach operacyjnych wymagających dodatkowego zabezpieczenia w trakcie siedzenia,
- użytkowników **wózków inwalidzkich**, którzy potrzebują stabilizacji podczas codziennych czynności i transportu,
- pacjentów korzystających z krzeseł i foteli rehabilitacyjnych w gabinecie lub domu.

Pas może być stosowany zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach medycznych, oddziałach szpitalnych, domach opieki czy ośrodkach rehabilitacyjnych.

Budowa i parametry techniczne

- **Zakres regulacji:** ok. 72–190 cm (rozmiar L) – jeden pas dla szerokiej grupy pacjentów.
- **Przeznaczenie:** stabilizacja miednicy i tułowia w pozycji siedzącej.
- **Zapięcie:** mocna klamra, umożliwiająca szybkie założenie i odpięcie pasa przez opiekuna.
- **Materiał:** wytrzymała tkanina bawełniano-poliestrowa, przyjazna dla skóry.
- **Konserwacja:** możliwość prania w temperaturze 40°C, co ułatwia utrzymanie higieny.
- **Kolor i wykończenie:** estetyczny wygląd, solidne szycie, niewielka waga.
- **Miejsce mocowania:** pas można zamocować do oparcia i/lub siedziska wózka, krzesła lub fotela.

Najważniejsze korzyści dla pacjenta i opiekuna

- Zapewnia **stabilną i bezpieczną pozycję siedzącą**, ograniczając ryzyko zsunięcia się z siedziska.

-
- Wspiera **prawidłowe ustawienie miednicy i tułowia**, co pomaga zmniejszać ryzyko przeciążeń kręgosłupa.
 - Poprawia komfort i poczucie bezpieczeństwa osoby siedzącej – szczególnie w czasie transportu i dłuższego przebywania na wózku.
 - Prosta i szybka obsługa – pas można łatwo założyć, dopasować i odpiąć.
 - Dzięki regulacji długości może być używany przez różnych pacjentów, co jest korzystne w placówkach medycznych.
 - Możliwość prania pozwala utrzymać wysoki poziom higieny przy częstym użytkowaniu.

Jak prawidłowo używać pasa stabilizującego?

1. Umieść pas na wysokości miednicy i dolnej części tułowia pacjenta, tak aby szeroka część obejmowała brzuch i plecy.
2. Przeprowadź taśmy mocujące wokół oparcia lub elementów konstrukcyjnych wózka / fotela zgodnie z instrukcją producenta.
3. Zepnij klamrę i dociągnij pas tak, aby stabilizował tułów i miednicę, ale nie powodował dyskomfortu ani utrudnienia oddechu.
4. Sprawdź, czy pacjent siedzi prosto, a pas nie uciska okolic bioder, brzucha i klatki piersiowej.
5. Regularnie kontroluj ułożenie pasa podczas użytkowania, szczególnie przy dłuższym siedzeniu lub zmianie pozycji.

Pas stabilizujący miednicę i tułów powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty oraz instrukcją producenta. Nie zastępuje pasów bezpieczeństwa przeznaczonych do transportu samochodowego.

Powiązane produkty i kategoria pasów stabilizujących

W ofercie sklepu **UGUL.pl** znajdziesz także inne pasy do stabilizacji dopasowane do różnych potrzeb pacjentów. Jeśli szukasz alternatywnych rozwiązań, sprawdź również:

- [Uniwersalny pas stabilizacyjny z rzepem](#) – wygodny pas z zapięciem na rzep, idealny m.in. do foteli rehabilitacyjnych.
- [Pas stabilizujący do fotela rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego – zapinany na rzep](#) – dobre rozwiązanie dla osób, które preferują szybkie zapięcie rzepowe.
- [Pas do stabilizacji pacjenta \(pionizacji\) do stołu pionizacyjnego](#) – dedykowany do stabilizacji pacjenta w pozycji stojącej.

Więcej podobnych rozwiązań znajdziesz w kategorii [pasy do stabilizacji](#).