

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-stabilizujacy-miednice-p-237.html>

## Pas stabilizujący miednicę Salvacclip 2 do wózka inwalidzkiego

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>159,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>129,27 zł</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>UG-TGO-PS-SCP4275</b> |

### Opis produktu

Pas stabilizujący miednicę to rodzaj pasa rehabilitacyjnego, który pomaga utrzymać bezpieczną pozycję siedzącą u osób z ograniczoną kontrolą tułowia.

### Pas stabilizujący miednicę Salvacclip 2 – asekuracja pacjenta na wózku inwalidzkim

**Pas stabilizujący miednicę Salvacclip 2** z ujęciem krocza to profesjonalny **pas asekuracyjny do wózka inwalidzkiego**, krzesła lub fotela. Został zaprojektowany z myślą o osobach, które mają trudności z utrzymaniem stabilnej pozycji siedzącej – zapobiega zsuwaniu się z siedziska, a jednocześnie pozwala zachować swobodę ruchów kończyn.

Dzięki regulowanej długości i ergonomicznej budowie pas można łatwo dopasować do sylwetki pacjenta. Dodatkowy element obejmujący krocze zwiększa bezpieczeństwo, szczególnie u osób bardzo niespokojnych lub z dużym deficytem kontroli tułowia i miednicy.

### Zastosowanie pasa do stabilizacji miednicy

Pas stabilizujący miednicę Salvacclip 2 sprawdzi się w szczególności u:

- pacjentów korzystających z **wózków inwalidzkich**, krzeseł lub foteli rehabilitacyjnych,
- osób starszych i niepełnosprawnych z ograniczoną kontrolą tułowia i miednicy,
- pacjentów po urazach, udarach i zabiegach operacyjnych, wymagających zabezpieczenia w pozycji siedzącej,
- osób narażonych na zsuwanie się z siedziska w czasie transportu lub dłuższego przebywania na wózku,
- podopiecznych w domach opieki, na oddziałach szpitalnych oraz w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pas może być stosowany zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach medycznych, jako element codziennej **asekuracji pacjenta na wózku inwalidzkim**.

### Budowa i parametry techniczne pasa Salvacclip 2

- **Model:** Salvacclip 2, pas stabilizujący miednicę z ujęciem krocza,
- **Rozmiary:** SCP 4275M - **Rozmiar M** – obwód ok. 100–140 cm, SCP 4275L - **Rozmiar L** – obwód ok. 120–156 cm,
- **Przeznaczenie:** stabilizacja miednicy w pozycji siedzącej na wózku, krześle lub fotelu,
- **Element krocza:** dodatkowy pas przechodzący między nogami, zapobiegający zsunięciu z siedziska,
- **Zapięcie:** rzep + mocna klamra, umożliwiające szybkie założenie i odpięcie,
- **Materiał:** tkanina nieprzepuszczająca płynów, łatwa w utrzymaniu czystości,

- 
- **Konserwacja:** możliwość prania w temperaturze do 40°C,
  - **Przeznaczenie środowiskowe:** opieka domowa, domy opieki, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne.

## Najważniejsze zalety pasa stabilizującego miednicę

- zapewnia **bezpieczną i stabilną pozycję siedzącą** na wózku inwalidzkim,
- **element krocza** dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem się z siedziska,
- nie ogranicza ruchów kończyn ani pracy klatki piersiowej,
- regulowana długość pozwala dopasować pas do różnych użytkowników,
- tkanina odporna na przesiąkanie ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny,
- proste i szybkie zakładanie – wygodne dla opiekuna i personelu medycznego.

## Jak prawidłowo zakładać pas do stabilizacji miednicy?

1. Posadź pacjenta wygodnie na wózku, krześle lub fotelu, zadбай o jak najbardziej wyprostowaną postawę.
2. Ułóż szeroką część pasa na wysokości miednicy, tak aby dobrze obejmowała biodra.
3. Przeprowadź taśmę wokół elementów konstrukcyjnych wózka lub oparcia zgodnie z instrukcją producenta.
4. Przełóż element krocza między nogami pacjenta i zapnij go do głównej części pasa.
5. Zepnij klamrę i dociągnij pas, tak aby stabilizował miednicę, ale nie powodował ucisku i dyskomfortu.
6. Sprawdź, czy pacjent siedzi stabilnie, ma swobodę oddychania, a pas nie ociera skóry.

Pas stabilizujący miednicę Salvaclip 2 powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty oraz instrukcją producenta. Nie zastępuje pasów bezpieczeństwa przeznaczonych do transportu w samochodzie.

## Produkty powiązane – budowa kompletnego systemu stabilizacji

W sklepie **UGUL.pl** znajdziesz także inne [pasy do stabilizacji](#), które pomagają kompleksowo zabezpieczyć pacjenta:

- [Pas stabilizujący miednicę i tułów do wózka inwalidzkiego](#) – gdy potrzebna jest dodatkowa stabilizacja górnej części tułowia.
- [Pas do stabilizacji ud](#) – uzupełnienie stabilizacji kończyn dolnych, szczególnie przy większej skłonności do zsuwania.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** M , L (+ 20,00 zł )