

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/petla-glissona-z-orczykiem-p-22.html>

Pętla Glissona z orczykiem US-02 – wyciąg szyjny do rehabilitacji odcinka szyjnego

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	119,44 zł
Cena poprzednia	149,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	US-02

Opis produktu

Najważniejsze informacje o pętli Glissona US-02

- **Zastosowanie:** wyciąg szyjny, trakcja i odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa.
- **Kompatybilność:** kabiny UGUL oraz systemy wyciągowe z możliwością podwieszenia.
- **Konstrukcja:** skórzana uprząż, miękkie wykończenie wewnętrzne, stalowy orczyk i metalowe półkola.
- **Regulacja:** paski z otworami umożliwiają dopasowanie do użytkownika.
- **Przeznaczenie:** gabinety rehabilitacyjne, pracownie fizjoterapii oraz stosowanie domowe wyłącznie zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Pętla Glissona z orczykiem US-02 to klasyczny **wyciąg szyjny** stosowany w kinezyterapii i fizjoterapii do kontrolowanego odciążenia i trakcji **odcinka szyjnego kręgosłupa**. Skórzana uprząż stabilizuje głowę, a metalowy orczyk równomiernie rozkłada siłę na brodzie i potylicy, co ułatwia wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w **kabinach UGUL** oraz innych systemach wyciągowych z możliwością podwieszenia. Sprawdza się zarówno w gabinetach rehabilitacji, jak i w warunkach domowych – pod warunkiem stosowania zgodnie z zaleceniami specjalisty i zgodnie z instrukcją wyciągu szyjnego.

Co to jest pętla Glissona?

Pętla Glissona to specjalna uprząż zakładana pod brodę i na tył głowy, używana do wykonywania wyciągu szyjnego (trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa) w warunkach rehabilitacji.

Jak działa pętla Glissona z orczykiem?

Pętla Glissona jest mocowana pod brodą i w okolicy potylicy pacjenta. Poprzez zaczepy łączy się ją z **orczykiem**, a następnie z linką i obciążeniem lub innym mechanizmem wyciągu. Uzyskane w ten sposób delikatne, kontrolowane pociąganie wzdłuż osi kręgosłupa szyjnego może:

- zmniejszać nacisk na stawy międzykręgowe i otaczające je tkanki,
- pomagać w odciążeniu struktur nerwowych,
- ułatwiać rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni karku,
- przygotowywać pacjenta do dalszych ćwiczeń czynnych i manualnych.

Zakres siły trakcji, czas trwania i częstotliwość zabiegów zawsze powinny być dobrane indywidualnie przez lekarza lub fizjoterapeutę.

Zastosowanie pętli Glissona US-02

Pętla Glissona z orczykiem jest elementem wyposażenia wielu pracowni fizjoterapii. Najczęściej wykorzystuje się ją w procedurach trakcyjnych i ćwiczeniach w odciążeniu w obrębie szyi, m.in.:

- przy przeciążeniach i zespołach bólowych **odcinka szyjnego kręgosłupa**,
- w przebiegu **dyskopatii szyjnej** oraz zmian przeciążeniowo-zwyrodnieniowych (zgodnie z zaleceniami lekarza),
- po urazach i długotrwałym przeciążeniu mięśni karku,
- w celu zwiększenia przestrzeni międzykręgowej i poprawy ruchomości odcinka szyjnego,
- jako uzupełnienie programu ćwiczeń rozciągających i stabilizujących.

Pamiętaj, że zastosowanie pętli Glissona powinno być każdorazowo skonsultowane z lekarzem lub fizjoterapeutą, który oceni wskazania i ewentualne przeciwwskazania.

Konstrukcja i zalety pętli Glissona z orczykiem

- **Skórzana uprząż** – zewnętrzna część pętli wykonana jest z wysokiej jakości skóry, odpornej na rozciąganie i codzienną eksploatację.
- **Miękkie wykończenie wewnętrzne** – strona przylegająca do skóry wyściełana jest gęstym filcem, który poprawia komfort i zmniejsza ryzyko podrażnień.
- **Lakierowany orczyk stalowy** – pręt stalowy przystosowany do pracy pod obciążeniem, zapewnia równomierne rozłożenie siły trakcji.
- **Stalowe półkola** – stabilne punkty mocowania, ułatwiające szybkie zaczepienie linek i karabińczyków.
- **Regulacja obwodu** – system pasków i dziurek pozwala dopasować pętlę do obwodu głowy pacjenta.
- **Polska produkcja** – wyrób wykonany w Polsce, przeznaczony do profesjonalnej rehabilitacji.

Parametry techniczne

Wymiary pętli Glissona:

- szerokość całkowita pętli: ok. **820 mm**,
- wysokość w najszerszym odcinku: ok. **120 mm**.

Wymiary orczyka:

- szerokość orczyka: ok. **370 mm**,
- wysokość orczyka: ok. **150 mm**.

Model: US-02 – pętla Glissona z orczykiem do wyciągu szyjnego w kabinach UGUL i podobnych systemach podwieszeń.



Zamiennie stosowane symbole pętli Glissona z orczykiem: **US02, US-02, US/02, PG**.
Produkt znany także jako: **pętla Glissona do wyciągu szyjnego, pętla Glissona do kabiny UGUL**.

Kolor wyciągu szyjnego może różnić się od prezentowanego na zdjęciach – naturalna skóra może mieć różne odcienie.

Bezpieczeństwo i status wyrobu medycznego

Pętla Glissona z orczykiem US-02 uzyskała pozytywną akceptację **Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**, co potwierdza możliwość stosowania jej w profesjonalnej rehabilitacji.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi wyciągu szyjnego oraz zastosuj się do zaleceń lekarza lub fizjoterapeuty.

Nieprawidłowo dobrane obciążenie lub czas traktacji mogą być niewskazane przy niektórych schorzeniach.