

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/przyrzad-do-cwiczen-wspomaganych-pulltim-p-201.html>



Przyrząd do ćwiczeń wspomaganych PullTIM

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	111,11 zł
Numer katalogowy	TGO-PullTIM

Opis produktu

Przyrząd do ćwiczeń wspomaganych z linką wraz z uchwytami zakładanej na bloczki jest idealny do ćwiczenia w domu. Nadaje się do rehabilitacji kończyn górnych, obręczy barkowej oraz górnej części tułowia.

Przyrząd do ćwiczeń wspomaganych składa się ze stalowej konstrukcji:

- ramy w kształcie litery V
- klamry mocującej
- dwóch bloczków

oraz:

- linki o długości 265 cm
- dwóch plastikowych uchwytów

Klamra mocująca daje możliwość zamocowania przyrządu na drzwiach różnej grubości.

Przyrząd zaleca się stosować w następujących przypadkach:

- Odbudowa zakresu ruchów w stawach kończyn górnych.
- Przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem (opatrunki gipsowe lub zabieg operacyjny).
- Przywrócenie funkcji motorycznych oraz rekonstrukcja prawidłowego wzorca ruchowego (problemy neurologiczne).

Dane techniczne:

Waga: **0,68 kg**

Maks. obciążenie bloczka: **5 kg**

Szerokość drzwi: **3,50 - 4,15 cm**

Sposób montażu:

Wsunąć pierwszy bloczek na ramię „V” stroną A (Rys. 1) i przesunąć do miejsca blokady.

Wsunąć drugi bloczek na ramię „V” stroną B (Rys. 1) i przesunąć do miejsca blokady.

Zamocować ramię „V” na klamrze mocującej:

koniec A ramienia „V” włożyć do otworu montażowego A w klamrze mocującej (Rys. 2),

koniec B ramienia „V” włożyć do otworu montażowego B w klamrze mocującej (Rys. 2).

Zawiesić przyrząd na drzwiach za pomocą klamry mocującej.

Przeciągnąć sznurek przez oba bloczki.

Końcówki sznurka przeciągnąć przez środkowe otwory w rączkach i mocno związać na odpowiedniej wysokości.

Przyrząd może być używany opcjonalnie z jedną rączką i niewielkim ciężarkiem przymocowanym do przeciwnego końca sznurka.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, nie powinny korzystać z tego produktu bez pomocy osób trzecich.

Sprawdzić przyrząd przed użyciem i upewnić się, że wszystkie części są bezpieczne, a lina nie wykazuje oznak nadmiernego zużycia.