

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/salvafix-transit-svf3180-magnetyczny-komplet-pasow-do-przemieszczania-pacjenta-p-244.html>



SalvaFix Transit SVF3180 - magnetyczny komplet pasów do przemieszczania pacjenta

Cena brutto	979,00 zł
Cena netto	906,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U-TGO-SVF3180

Opis produktu

SalvaFix Transit SVF3180 - magnetyczny komplet pasów do kontrolowanego przemieszczania pacjenta

SalvaFix Transit to zestaw zabezpieczający przeznaczony dla sytuacji, w których pacjent musi pozostać w ruchu: przejść na badanie, do ambulansu, na inny oddział albo po prostu usiąść, a jednocześnie wymaga ograniczenia swobody rąk i długości kroku. Nadgarstki pozostają przy pasie biodrowym, kostki łączy krótka taśma, a całość spina pionowa taśma łącząca. Pacjent może iść drobnymi krokami i siadać, nie ma natomiast możliwości wyprowadzenia ciosu, kopnięcia ani sięgnięcia do zamków.

W literaturze fachowej takie rozwiązania określa się mianem pasów ambulatoryjnych (ang. *ambulatory restraints*). Opisywano je jako sposób na skrócenie izolacji i unieruchomienia w łóżku u pacjentów z nawracającą agresją oraz jako standard bezpieczeństwa podczas eskortowania pacjentów oddziałów sądowych poza oddział.

Zastosowanie

- eskortowanie pacjenta wewnątrz placówki: na diagnostykę obrazową, konsultacje, zabiegi, przy zmianie oddziału,
- doprowadzenie pacjenta do środka transportu i transport międzyszpitalny w pozycji siedzącej,
- oddziały psychiatryczne, w tym psychiatrii sądowej o podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu,
- szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć, w sytuacjach pobudzenia psychoruchowego,
- jako mniej restrykcyjna forma zabezpieczenia niż unieruchomienie w łóżku, gdy stan pacjenta pozwala na chodzenie i siedzenie.

Z czego składa się zestaw

Element	Funkcja
Pas biodrowy z przyszytymi opaskami na nadgarstki (SVF3280)	Utrzymuje ręce w wygodnej pozycji przy biodrach. Zapięcie pasa znajduje się z tyłu, poza zasięgiem dłoni pacjenta.
Opaski na kostki połączone taśmą (SVF3380)	Skracają krok, pozwalają na powolne chodzenie i siadanie, uniemożliwiają bieg i kopnięcie.
Taśma łącząca 105 cm (SVF3480)	Łączy pas biodrowy z taśmą między kostkami, dzięki czemu obie części pracują jako jeden system.
6 zamków magnetycznych i 2 klucze Blue Key	Zamki otwiera wyłącznie dedykowany klucz magnetyczny. Dwa klucze

	pozwalają rozdzielić je między członków zespołu eskortującego.
--	--

Wykonanie

- opaski wyściełane miękkim materiałem, który ogranicza ryzyko otarć i ucisku,
- rzep na opaskach ułatwia szybkie i dopasowane założenie, a zamek magnetyczny zabezpiecza całość,
- oczka ze stali nierdzewnej, otwory zgrzewane ultradźwiękowo, co chroni taśmę przed rozdarcie,
- wzmocnienia w miejscach największych obciążeń i miękkie lamówki na krawędziach,
- oznaczenie kolorem lamówki: niebieska dla elementów górnych, brązowa dla dolnych, co przyspiesza orientację przy zakładaniu,
- główki zamków standardowych SVF3500 zawierają dodatek przeciwdrobnoustrojowy Biomaster, badany według normy ISO 22196.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	SVF3180
Linia	SalvaFix Transit
Rozmiar	M/L
Obwód nadgarstka	14 - 25 cm
Obwód kostki	19 - 30 cm
Szerokość opasek	8 cm
Długość taśmy łączącej	105 cm
Zamki w zestawie	6 szt., magnetyczne standardowe (wytrzymałość do 150 kg)
Klucze w zestawie	2 szt., Blue Key z magnesem neodymowym i pierścieniem centrującym
Materiał taśm	poliester, oczka ze stali nierdzewnej
Producent	Medi Care System S.L.U., Hiszpania
Status	wyrób medyczny

Uwaga dotycząca zamków: standardowe zamki magnetyczne nie otwierają się prawidłowo w stanie zamoczone. W miejscach, gdzie pasy mogą ulec zamoczeniu, warto zastosować zamki Waterproof SVF3505 (do 300 kg) albo zamki mechaniczne SVF3520.

Zasady bezpiecznego stosowania

- Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami placówki i obowiązującymi przepisami.
- Zastosowanie pasów wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi jest formą przymusu bezpośredniego w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wymaga zlecenia, nadzoru i dokumentowania według tej ustawy i przepisów wykonawczych, niezależnie od tego, czy pacjent leży, siedzi, czy chodzi.
- Pacjent w zestawie nie może pozostawać bez nadzoru. Ręce unieruchomione przy biodrach nie pozwalają amortyzować upadku, dlatego podczas przemieszczania osoba asystująca powinna iść tuż obok pacjenta. Należy unikać schodów i śliskich nawierzchni.
- Po założeniu sprawdzić dopasowanie opasek: pod opaskę powinien wchodzić palec. Regularnie kontrolować krążenie, kolor i ucieplenie dłoni i stóp oraz stan skóry.
- Przed założeniem odebrać pacjentowi przedmioty, które mogłyby posłużyć do uszkodzenia zamka lub zranienia.
- Klucze przechowywać w sposób kontrolowany. Personel eskortujący musi mieć klucz przy sobie przez cały czas stosowania zestawu.
- Nie stosować uszkodzonych elementów ani zamków innych systemów.

Czyszczenie i konserwacja

Przed praniem należy zdjąć wszystkie zamki. Taśmy prać zgodnie z oznaczeniami na etykiecie wyrobu. Zamków i kluczy nie należy prać razem z pasami, można je przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym. Po każdym użyciu warto sprawdzić stan oczek, szwów i rzepów.

Akcesoria i produkty powiązane

- [Klucz magnetyczny SalvaFix SVF3551](#) - klucz zapasowy do zamków SVF3500, SVF3505, SVF3510,
- [SalvaFix DUO](#) - uniwersalne pasy na nadgarstki lub kostki do mocowania do łóżka,
- [Komplet pasów unieruchamiających SalvaFix](#) - pełny system do zabezpieczenia pacjenta w łóżku.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pacjent może chodzić i siadać w tym zestawie?

Tak. Taśma między kostkami pozwala na chodzenie drobnymi krokami, a konstrukcja zestawu nie przeszkadza w siadaniu na krześle, wózku czy fotelu w ambulansie. Bieg, kopnięcie i unoszenie rąk są natomiast ograniczone.

Czym różni się SalvaFix Transit od zestawów do mocowania w łóżku?

Zestawy łóżkowe mocuje się do ramy łóżka lub noszy, więc pacjent pozostaje w pozycji leżącej. Transit nie ma punktów mocowania do mebli: wszystkie elementy są połączone ze sobą na ciele pacjenta, dzięki czemu zachowuje on możliwość poruszania się.

Czy pacjent może sam otworzyć zamek?

Zamki magnetyczne otwiera wyłącznie dedykowany klucz. Dodatkowo zapięcie pasa biodrowego znajduje się z tyłu, a dłonie są utrzymywane przy biodrach, co utrudnia sięgnięcie do zamków.

Jaki rozmiar wybrać?

Zestaw występuje w rozmiarze M/L: opaski na nadgarstki obejmują obwód 14 - 25 cm, a na kostki 19 - 30 cm. Przed zamówieniem warto zmierzyć obwody u typowych pacjentów oddziału.

Czy elementy zestawu można kupić osobno?

Producent oferuje osobno pas z opaskami na nadgarstki (SVF3280), opaski na kostki (SVF3380) i taśmę łączącą (SVF3480). W sprawie dostępności pojedynczych elementów prosimy o kontakt.

Czy standardowe zamki działają po zamoczeniu?

Nie zawsze. Zamoczony zamek standardowy może się nie otworzyć kluczem magnetycznym. Do zastosowań w takich warunkach przeznaczone są zamki Waterproof SVF3505 lub zamki mechaniczne.

Czy zestaw nadaje się do użytku domowego?

Nie. SalvaFix Transit jest wyrobem przeznaczonym dla placówek medycznych i zespołów transportowych, do stosowania przez przeszkolony personel pod stałym nadzorem.